


操作方法 クイックマニュアル




① ログイン画面にて
ID, パスワード
を入力

ID, PWは？ 下記の3つの方法で確認できます

- 事前参加登録ページ (<https://secure101.jtbcom.co.jp/jabcs2021/>) にログインしてご確認ください。
- 日本乳癌検診学会 会員にメールで届くニュースレター
- 当日登録の方は、現地読影セミナー会場前に掲示

1


② 閲覧する画像をダブルクリックするとViewerが起動

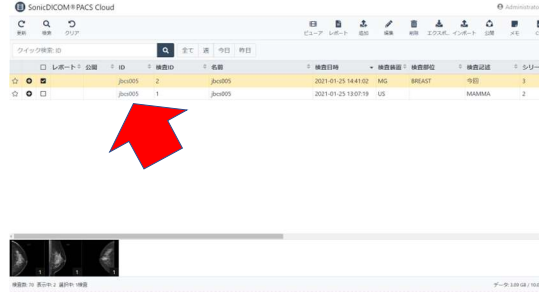

クイック検索ID	ID	検査ID	名前	検査日時	検査施設	検査部位	検査設定	シリーズ
	jbc005	2	jbc005	2021-01-25 14:41:02	MG	BREAST	今回	3
	jbc005	1	jbc005	2021-01-25 13:07:19	US	MAMMA		2


2

③ Viewerを使って読影




3

上に動かすと縮小します。

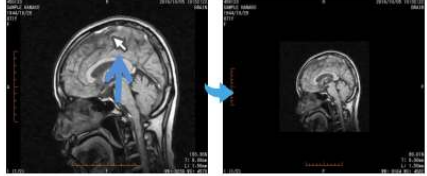


下に動かすと拡大します。

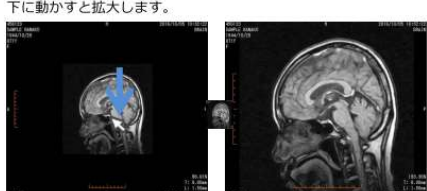

拡大縮小

4

W/L

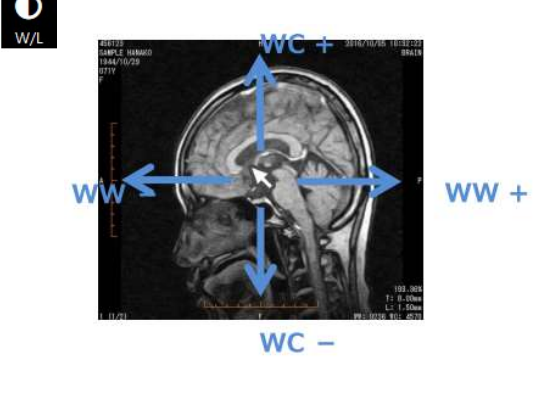

WW +

WC +


WC -

5

シリーズ

ここからは、便利な機能を紹介します

総合判定USはシリーズを1にして読影するとよい

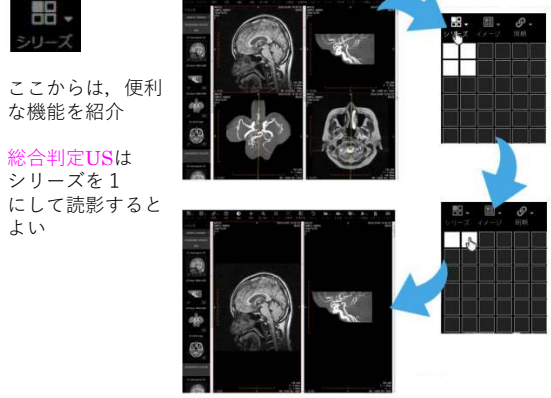


6


サムネイルバーからドラッグ&ドロップすることで
画像表示領域に表示もできる



7

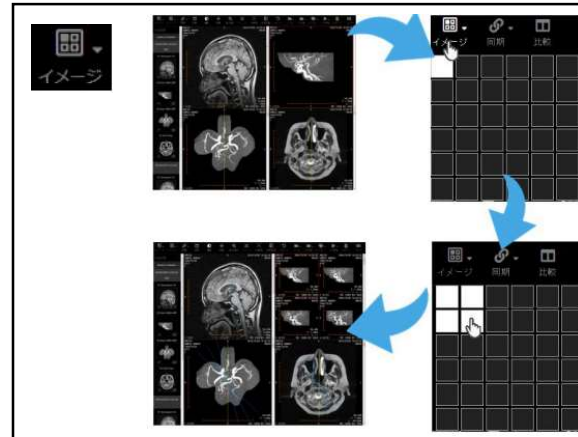

8

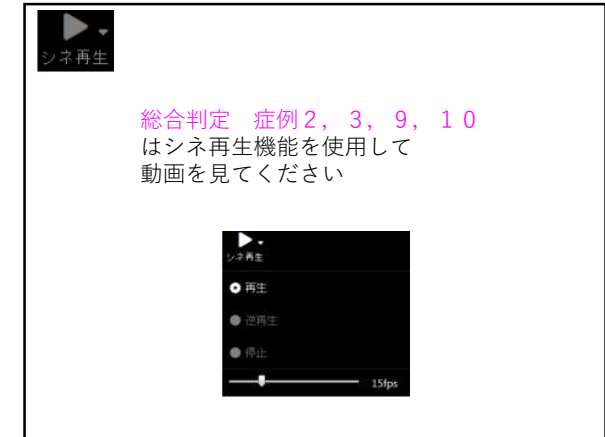

9